

# Cerufil

Spray Auricolare 50 ml



Distribuito da Momapprime Pharma Srl

Cerufil spray è un dispositivo medico ad uso otologico utile nell'igiene specifica della cavità auricolare nonché per la rimozione degli eccessi di cerume riducendo, così, i rischi di proliferazioni batteriche e micotiche nel canale auricolare, causa spesso, di irritazioni e infiammazioni.

## Composizione:

Aqua, glycerin, propylene glycol, lactic acid, boric acid, sodium docusate, sodium chloride, potassium sorbate, EDTA, sodium benzoate, chamomilla recutita flower water, polysorbate 20, sorbitan oleate.

## Modo d'uso:

1. Togliere il cappuccio di protezione dell'erogatore;
2. Sciacquare l'erogatore prima dell'utilizzo;
3. Inclinare il busto e ruotare la testa di 45°, introdurre l'imboccatura dell'erogatore all'ingresso della cavità dell'orecchio e premere una o più volte fino a farne uscire la quantità desiderata;
4. Trazionare il padiglione auricolare verso l'alto ed indietro per raddrizzare il Condotto Uditivo Esterno (CUE);
5. Attendere qualche secondo per far agire la soluzione, sollevare la testa e asciugare il liquido in eccesso;
6. Ripetere l'operazione secondo necessità;
7. Pulire l'erogatore;
8. Rimettere il cappuccio di protezione dell'erogatore.

## Avvertenze:

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non ingerire. Non utilizzare in caso di timpano perforato. Non spruzzare negli occhi. Non utilizzare su cute lesa. Non utilizzare il prodotto se la confezione non si presenta integra. Non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza, la data di scadenza si riferisce al prodotto integro e correttamente conservato. In alcuni casi la nebulizzazione può causare un lieve e transitorio senso di irritazione locale e/o vertigini.

## Conservazione:

Conservare la confezione ben chiusa in luogo asciutto, a riparo dalla luce e da fonti di calore.

## Effetti collaterali:

Ipersensibilità accertata verso uno o più componenti. L'uso prolungato può dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione. Qualora ciò si verifici, interrompere il trattamento e consultare il medico al fine di istituire idonea terapia. E' importante segnalare al medico o al farmacista la comparsa di effetti indesiderati non descritti nel presente foglietto illustrativo. L'utilizzo da parte di più persone di uno stesso flacone, può comportare la non efficacia del prodotto, l'acuirsi delle problematiche già in essere e il manifestarsi di problematiche precedentemente non presenti.

## Presentazione:

Soluzione in flacone in vetro da 50 ml con erogatore spray.



Fabbricante:

Gruppo Farmaimpresa srl  
Via Cipro, 1  
25124 - Brescia (Italy).



*Il Dispositivo Medico non deve essere gettato nell'acqua di scarico o nei rifiuti domestici. Chieda al farmacista come eliminare i Dispositivi Medici che non utilizza più. Questo aiuterà a proteggere l'ambiente.*